

## NOTICE D'UTILISATION

### PROTECTIV™ Profile

#### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**



#### CE KIT CONTIENT :

- 1 masque barrière Protectiv™ Profile
- 1 élastique plat à boutonnière
- 1 cartouche filtrante
- + - 1 feuille de 10 filtres 57mm, lavables 20 fois et pré-découpés (1 filtre/utilisation pour 2 x 4 heures de protection pendant 100 jours)

## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

### Montage du masque avec sa cartouche filtrante :

1. **Avant toute manipulation, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.**
2. Inspectez le masque, la cartouche filtrante, le filtre et l'élastique. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
3. Prenez votre cartouche filtrante et insérez d'abord la partie inférieure (côté menton) dans l'encoche prévue à cet effet, puis basculer la partie supérieure jusqu'à entendre un « clic » lorsqu'elle est fixée.



4. Attachez l'élastique sur les deux boutons latéraux et ajustez-le à votre tour de tête.
5. Pour vérifier l'étanchéité du masque, bouchez l'extrémité avec la paume de la main et inspirez.
6. Le masque est conçu afin que vous puissiez le thermoformer vous-même suivant la procédure (ci-dessous) dans le cas où il n'épouserait pas parfaitement le contour de votre visage.
7. **Avant le premier usage, nettoyez le masque monté (voir instructions plus bas).**

### Thermoformage maison :

1. Si le masque n'épouse pas parfaitement votre visage, vous pouvez le thermoformer à la maison.
2. Faites bouillir de l'eau dans une casserole.
3. Sur votre casserole, posez une passoire sur laquelle vous déposez le masque face visage contre fond.
4. Laissez-le prendre la température pendant une minute.
5. Approchez le masque contre votre visage **en vérifiant qu'il n'est pas brûlant** (inertie thermique forte donc le masque ne devrait pas être très chaud) et apposez-le sur votre visage pour le conformer.
6. Bloquez l'embout avec la paume de la main et inspirez quelques secondes.
7. Relâchez, le masque est personnalisé à votre visage !

### Chargement de la cartouche avec le filtre :

1. Pour retirer la cartouche du masque, positionnez vos pouces sur les 2 extrémités, au niveau du menton et du nez.
2. Avec le pouce situé sur la partie nez, exercez une pression vers le haut. La cartouche devrait alors s'ouvrir.
3. Inspectez ensuite la feuille de filtres. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations. Puis enlevez le filtre pré-découpé.
4. **Positionnez le filtre** sur la cartouche et réinsérez-la sur l'embout du masque.

5. **Attention : la filtration catégorie 1\* de ce masque n'est garantie qu'avec l'utilisation de notre filtre.**

*\*Consulter rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.*

### Si vous êtes à court de filtres tissus :

1. **En cas de secours uniquement et pour une utilisation n'excédant pas plus de 2 heures**, la Rosace est compatible avec des disques démaquillants standards.
2. De préférence, placez un filtre fourni dans la Rosace, côté respiration, puis positionnez le coton démaquillant dessus.
3. **Attention : la filtration catégorie 1 n'est alors plus garantie. Cependant, nous sommes en attente de classification par la DGA (Direction Générale de l'Armement en charge de classifier les médias filtrants).**

### Pour le mettre :

1. Tenez le masque par l'élastique.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Positionnez l'élastique sur le haut de votre tête, en passant au-dessus des oreilles. Vous pouvez l'ajuster en réglant les différents crans de réglages.



4. Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton.

### Lorsque vous le portez :

1. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux (hors élastique).
2. Évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

### Il faut changer les filtres et la cartouche filtrante :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand il devient difficile de respirer.
3. Si le masque s'humidifie fortement.

### Il faut changer le masque (exceptionnellement) :

1. Si le masque est endommagé.

### Pour ôter le masque :

1. **Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**
2. Retirez la lanière élastique pour décoller le masque de votre visage.

3. En attendant de le laver, ainsi que les filtres, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

---

## COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

### Avant ouverture :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Pour le laver :

1. Pour laver votre masque monté avec sa cartouche filtrante, **nous préconisons un lavage au lave vaisselle, en programme 60°C minimum pendant au moins 30 minutes.**
2. **Les filtres sont certifiés lavables 20 fois en machine à laver dans un programme de 60°C pendant 30 minutes minimum.** Si vous les lavez en machine, placez-les dans un filet afin de ne pas les perdre. Toutefois, vous pouvez également laver vos filtres au lave vaisselle, en les laissant dans la cartouche filtrante. Après avoir touché le masque et les filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
3. Les filtres ont été testés pour 20 lavages. **Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.**
4. Lorsque le programme de lavage est terminé, sortez le masque et les filtres.

### Après lavage :

1. Faites sécher le masque et les filtres dans leur intégralité.
2. Pour cela, faites-les sécher à l'air libre **sur un support propre et désinfecté.**
3. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse température.
4. **Astuce :** pour rendre le masque plus brillant, nous préconisons de le lustrer avec un peu d'huile de tournesol bio.
5. Dès que le masque et les filtres sont secs, stockez-les pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

---

## SÉCURITÉ

1. Les filtres ont démontré une efficacité de filtration de 95 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque (rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.)
2. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

---

## AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

*Ce masque Protectiv™ Profile n'est ni un EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni un dispositif médical selon la directive 93/42/CEE. Nous sommes cependant en cours d'homologation pour être conforme à ces standards.*