

NOTICE D'UTILISATION

PROTECTIV® R

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction -des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**



CE KIT CONTIENT :

- 1 masque barrière Protectiv® R
- 1 élastique plat à boutonnière
- 1 cartouche filtrante Rosace 42mm
- + - 60 filtres lavables 10 fois (2 x 4 h / jour, pour 100 jours)



COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Montage du masque avec sa Rosace 42mm :

1. **Avant de toucher le masque et ses filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.**
2. Inspectez le masque, sa cartouche filtrante, les filtres et l'élastique. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
3. Insérez votre Rosace 42 mm en alignant l'encoche sur l'embout du masque avec celle de la cartouche filtrante :



4. Posez et tournez jusqu'à sentir un « clic ».
5. Fixez l'élastique sur les deux boutons latéraux et ajustez-le à votre tour de tête.
6. Pour vérifier l'étanchéité du masque, bouchez son l'extrémité avec la paume de la main et inspirez.
7. Le masque est conçu afin que vous puissiez le thermoformer vous même suivant la procédure (voir instructions à droite), dans le cas où il n'épouserait pas parfaitement le contour de votre visage.
8. **Avant le premier usage, nettoyez le masque monté (voir instructions plus bas).**

Thermoformage maison :

1. Si le masque n'épouse pas parfaitement votre visage, vous pouvez le thermoformer à la maison.
2. Faites bouillir de l'eau dans une casserole.
3. Sur votre casserole, posez une passoire sur laquelle vous déposez le masque face visage contre fond.
4. Laissez-le prendre la température pendant une minute.
5. Approchez le masque contre votre visage **en vérifiant qu'il n'est pas brûlant** (inertie thermique forte donc le masque n'est pas très chaud) et apposez-le sur votre visage pour le conformer.
6. Bloquez l'embout avec la paume de la main et inspirez quelques secondes.
7. Relâchez, le masque est personnalisé à votre visage !

Chargement de la Rosace 42 mm avec les filtres :

1. Inspectez la feuille de filtres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
2. **Insérez 3 filtres** dans la Rosace filtrante et refermez bien en la clipsant sur l'embout du masque.
3. **Attention : la filtration catégorie 1* de ce masque n'est garantie qu'avec l'utilisation de 3 filtres en simultané.**

*Consulter rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.

Pour le mettre :

1. Tenez le masque par l'élastique.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Positionnez l'élastique sur le haut de votre tête, en passant au dessus de vos oreilles. Vous pouvez l'ajuster en réglant les différents crans de réglages.



4. Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

1. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux (hors élastique).
2. Évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer les filtres et la cartouche filtrante :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand il devient difficile de respirer.
3. Si le masque s'humidifie fortement.

Il faut changer le masque (exceptionnellement) :

1. Si le masque est endommagé.

Pour ôter le masque :

1. **Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**
2. Retirez la lanière élastique pour décoller le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, ainsi que les filtres, isolez-le dans un sac en plastique.
4. **Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le laver :

1. Pour laver votre masque et sa cartouche filtrante, **nous préconisons un lavage au lave-vaisselle**, en programme **60°C minimum pendant au moins 30 minutes**.
2. **Les filtres sont certifiés lavables 10 fois en machine à laver dans un programme de 60°C pendant 30 minutes minimum**. Si vous les lavez en machine, placez-les dans un filet afin de ne pas les perdre. Toutefois, vous pouvez également laver vos filtres au lave-vaisselle, en les laissant dans la rosace.
3. Après avoir touché le masque et les filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
4. Les filtres ont été testés pour 10 lavages. **Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie**.
5. Lorsque le programme de lavage est terminé, sortez le masque et les filtres.

Après lavage :

1. Faites sécher le masque et les filtres dans leur intégralité.
2. Pour cela, faites-les sécher à l'air libre **sur un support propre et désinfecté**.
3. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse température.
4. **Astuce** : pour rendre le masque plus brillant, nous préconisons de le lustrer avec un peu d'huile de tournesol bio.
5. Dès que le masque et les filtres sont secs, stockez-les pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

1. Les filtres ont démontré une efficacité de filtration de 95 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque (rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.)
2. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce kit, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Ce masque Protectiv® R n'est ni un EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni un dispositif médical selon la directive 93/42/CEE. Nous sommes cependant en cours d'homologation pour être conforme à ces standards.