

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Kitul Protectiv R

ATENȚIONARE

Pentru a vă proteja sănătatea și cea a altora, este foarte important să respectați aceste instrucțiuni de utilizare.


- Purtați această mască atunci când sunteți în contact cu alte persoane decât cele cu care trăiți.
- Verificați întotdeauna dacă masca este reglată corect și vă acoperă gura și nasul.
- Atenție: dacă sunteți bolnav, această mască nu este potrivită. Cereți părerea medicului dumneavoastră.
- Această mască nu este destinată personalului medical.
- **Această mască nu înlocuiește gesturile de barieră** (spălare regulată a mâinilor, distanțare fizică, reducerea contactului cu alte persoane). **Adăugă o barieră fizică, care poate fi folosită mai ales atunci când sunteți în contact strâns**



ACEST KIT CONȚINE:



Fotografie necontractată

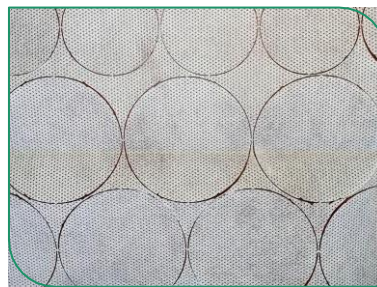

- 1 mască de protecție Protectiv R
 - 1 elastic plat cu buton
 - 2 cartușe filtrante:
 - o 1 Rozetă 42mm (diametru mic)
 - o 1 Rozetă 57mm (diametru mare)
- +**
- 1 foaie de 60 de filtre lavabile pre-tăiate
 - o 30 formate mici (Rozetă 42 mm)
 - o 30 formate mari (Rozetă 57 mm)

CUM SE POARTA MASCA?

Montarea măștii cu Rozetă de 42 mm (diametru mic) :

1. **Înainte de a atinge masca și filtrele acesteia, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau o soluție pe bază de alcool.**
2. Verificați masca, cartușele filtrante, filtrele și elasticul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorare.
3. Selectați cartușul cu filtru Rozetă de 42 mm.
4. Introduceți-l prin alinierea creștăturii de la capătul măștii cu cea a cartușului filtrant:



5. Poziționați și rotiți până când simiți un „clic”.
6. Atașați elasticul pe cele două butoane laterale și reglați-l la dimensiunea capului dvs.
7. Pentru a verifica etanșitatea măștii, acoperiți capătul cu palma și inspirați.
8. Masca este concepută astfel încât să o poți termoforma singur în conformitate cu procedura (vezi instrucțiunile din dreapta), în cazul în care nuse potrivește perfect conturului feței dvs.
9. **Înainte de prima utilizare, curățați masca montată (consultați instrucțiunile de mai jos).**

Montarea măștii cu Rozetă de 57mm (diametru mare) :

1. Înainte de a atinge masca și filtrele acesteia, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau o soluție pe bază de alcool.
2. Verificați masca, cartușele filtrante, filtrele și elasticul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorare.
3. Selectați cartușul cu filtru Rozetă de 57 mm.
4. Introduceți cartușul deschis, prezentat în filtru, așezând scutul în fața creștăturii de pe mască.



5. Rotiți în direcția săgeții până când face clic (capacul cartușului este orizontal) și închideți capacul.

6. Atașați elasticul pe cele două butoane laterale și reglați-l la dimensiunea capului dvs.
7. Pentru a verifica etanșitatea măștii, acoperiți capătul cu palma și inspirați.
8. Masca este concepută astfel încât să o poți termoforma singur urmând procedura de mai jos, încăzul în care nu se potrivește perfect conturului feței tale.
9. **Înainte de prima utilizare, curățați masca montată (consultați instrucțiunile de mai jos).**

Termoformare acasă:

1. Dacă masca nu se potrivește perfect feței tale, o poți termoforma acasă.
2. Fierbeți apa într-o cratiță.
3. Pe cratiță, puneți o strecurătoare pe care așezați masca cu fața în jos.
4. Lăsați-o să ia temperatura timp de un minut.
5. Aduceți masca pe față, **verificând că nu este fierbinte** (inerție termică puternică, deci masca nu este foarte fierbinte) și puneți-o pe față pentru a o conforma.
6. Blocați vârful cu palma și inspirați timp de câteva secunde.
7. Eliberați, masca este personalizată pe fața dvs.!

Încărcarea cartușului cu filtre:

1. Verificați foaia de filtre. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorare.
2. Selectați filtrele corespunzătoare cartușului ales: filtre mici pentru Rozeta de 42mm și filtre mari pentru Rozeta de 57mm.
3. Pe foaie, îndepărtați 3 filtre pre-tăiate de dimensiunea dorită.
4. **Introduceți cele 3 filtre** în cartușul selectat și închideți bine în funcție de cartuș: prin repositionarea Rozetei 42 pe capătul măștii sau prin închiderea capacului Rozetei 57.
5. **Atenție: filtrarea din categoria 1 * a acestei măști este garantată numai cu utilizarea a 3 filtre simultan.**

* Vizualizați raportul RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.



dacă rămâneți fără filtre de țesătură:

1. **În caz de urgență și pentru o utilizare care nu depășește 2 ore**, Rozeta de 57mm este compatibilă cu discurile de îndepărtare a machiajului standard.
2. Așezați-le în cartușul filtrant ca în cazul filtrelor convenționale.
3. **Atenție: filtrarea de categoria 1 nu mai este garantată. Cu toate acestea, așteptăm clasificarea de către DGA (Direcția Generală a Armamentului responsabil cu clasificarea mediilor de filtrare).**

Pentru a o pune :

1. Țineți masca de elastic.
2. Puneți-o la gură.
3. Puneți elasticul în spatele capului și reglați-l prin reglarea diferitelor creștături pe butoanele laterale.
4. Poziționați masca pentru a acoperi nasul, gura și bărbia.

Când o purtați:

5. Se recomandă purtarea măștii pe pielea goală, evitând contactul cu părul (cu excepția elasticului).
6. Evitați să o atingeți și să o mutați. Nu o puneți niciodată într-o poziție de așteptare pe frunte sau pe bărbie.

Filtrele și cartușul de filtrare trebuie schimbate:

2. Când ați purtat masca 4h.
3. Când devine dificil să respirați.
4. Dacă masca devine foarte umedă.

Trebuie să schimbați masca (în mod excepțional):

1. Dacă masca este deteriorată..

Pentru a scoate masca:

1. **Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool.**
2. Îndepărtați cureaua elastică pentru a scoate masca de pe față.
3. În așteptarea spălării și a filtrelor, izolați-o într-o pungă de plastic.
4. **Pentru a termina: spălați-vă din nou pe mâini cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool.**

CUM SĂ ÎNTREȚINEȚI MASCA??

Înainte de deschidere:

Depozitați masca în ambalajul său de protecție original, într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Păstrați-o într-o umiditate maximă de 75% și la o temperatură între -2 ° C și + 55 ° C pentru a-și păstra toate caracteristicile.

Pentru a o spăla:

1. Pentru a vă spăla masca și cartușele de filtrare, **vă recomandăm să o spălați în mașina de spălat vase, la un program de cel puțin 60 ° C timp de cel puțin 30 de minute.**
2. **Filtrele sunt certificate pentru a fi lavabile de 10 ori într-o mașină de spălat într-un program de 60 ° C timp de cel puțin 30 de minute.** Dacă le spălați la mașină, așezați-le într-o plasă pentru a nu le pierde. Cu toate acestea, vă puteți spăla și filtrele în mașina de spălat vase, lăsându-le în rozetă.
3. După ce atingeți masca și filtrele, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau soluție pe bază de alcool.
4. Filtrele au fost testate pentru 10 spălări. **După 10 spălări, filtrarea măștii nu mai este garantată.**

5. După terminarea programului de spălare, scoateți masca și filtrele.

După spălare:

1. Uscați masca și filtrele în totalitate.
2. Pentru a face acest lucru, uscați-le în aer liber **pe un suport curat și dezinfectat.**
3. Dacă este necesar, filtrele pot fi călcate la temperatură scăzută.
4. **De îndată ce masca și filtrele sunt uscate, păstrați-le într-un ambalaj curat, etanș (pungă de plastic sau sac de congelator, de exemplu).**



SECURITATE

1. Filtrele au demonstrat o eficiență de filtrare de 95% pentru particulele de 3 microni emise de persoana care poartă masca (raport RP / 20-3022 / DGA MNRBC / 2000305 / NP.)
2. Respirabilitatea măștii a fost măsurată la $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ și trebuie să fie purtată pentru o perioadă de 4 ore.

AVERTIZARE

În pofida tuturor grijilor acordate la fabricarea acestui kit, este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului și, în niciun caz, a producătorului sau furnizorului, să se asigure că masca este adecvată caracteristicilor mediului în care este utilizată. Recomandările și metodele de utilizare descrise mai sus ar trebui urmate cu scrupule.

Această mască Protectiv R nu este nici PPE conform Regulamentului (UE) nr. 2016/425, nici un dispozitiv medical conform Directivei 93/42 / CEE. Cu toate acestea, suntem în proces de certificare pentru a respecta aceste standarde.